

Option A - ÉCHANTILLON DE CHEVEUX - POILS

①

**ÉTAPE 1**

Laver les cheveux au moins quelques jours avant l'échantillonnage et les garder propres pendant la phase d'échantillonnage.

②

**ETAPE 2**

Coupez une petite mèche d'une dizaine de poils d'une longueur d'au moins 1 cm. Les cheveux peuvent être prélevés de n'importe quelle zone de la tête. Ne pas déchirer les cheveux. Vous pouvez également découper plusieurs pièces. Si les cheveux ont subi une teinture ou un traitement de teinture, le préciser dans la case appropriée du formulaire 62. Alternativement, vous pouvez utiliser les poils (spécifiez la zone de prélèvement).

③

**ETAPE 3**

Insérez la mèche de cheveux ou les poils dans un sac en papier ou en plastique en l'agrafant sur le formulaire 62.

④

**ETAPE 4**

Remplissez toutes les parties obligatoires marquées d'un * du formulaire 62 et signez le. Les formulaires non signés ne seront pas traités.

⑤

**ETAPE 5**

effectuer le paiement par virement bancaire (demander les coordonnées bancaires en écrivant à l'adresse info@daphnelab.com)

⑥

**ETAPE 6**

Envoyez le formulaire 62 avec l'enveloppe contenant l'échantillon de cheveux et le reçu de paiement à Daphne Lab (de préférence par courrier avec suivi) à l'adresse suivante :

**Daphne Lab - c/o Eldavia
Via Milano, 2
81030 Lusciano (CE)
ITALIE**

Option B - ÉCHANTILLON DE PRÉLÈVEMENT BUCCAL

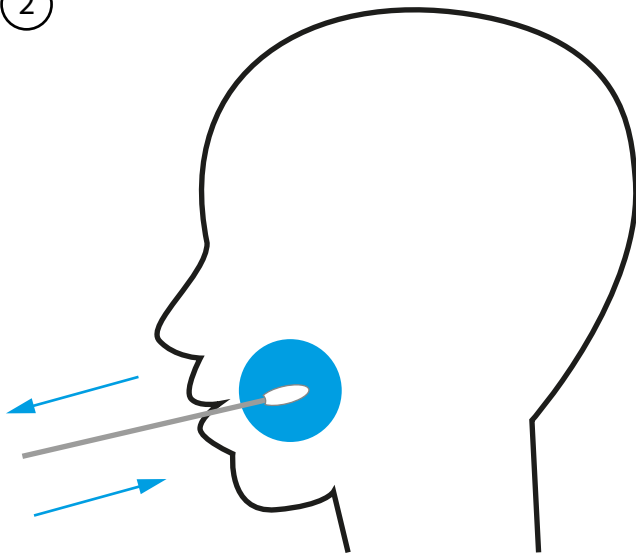
①

**ÉTAPE 1**

Il est recommandé de prélever l'échantillon entre les repas, la bouche propre et sans avoir pris de café, chewing-gum, thé, sirops, bonbons, etc. pendant au moins une demi-heure. L'eau est autorisée.

Afin de prendre correctement le prélèvement, la bouche doit être nettoyée.

②

**ÉTAPE 2**

Ouvrir le tampon buccal le long de la ligne pointillée ou n'importe où sur le côté opposé de la pointe en coton.

Retirer l'écouvillon en le saisissant sur le côté du bâtonnet et non sur celui du coton, avec les mains propres, bien lavées et nettoyées ou avec des gants jetables.

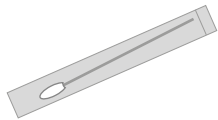
Après ouverture de l'emballage, prélever immédiatement les cellules épithéliales en frottant l'écouvillon à l'intérieur de la joue (dans la bouche) dix fois d'un côté et dix fois de l'autre côté de la joue, sans le plonger directement dans la salive.

ATTENTION : ne pas tamponner la gorge pour ne pas endommager les muqueuses et la structure de la gorge elle-même.

Une fois l'échantillon prélevé, remettre l'écouvillon dans son emballage, en laissant la partie en coton entrer en premier. Fermez l'emballage de ruban autoadhésif propre et scellez-le bien.

Envoyez 2 écouvillons pour chaque sujet.

③

**ÉTAPE 3**

Insérer l'écouvillon buccal dans le contenant de l'écouvillon buccal, l'agrafer sur le formulaire 62 ou sur son formulaire, inscrire le nom et le prénom du sujet sur le contenant de l'écouvillon.

④

**ÉTAPE 4**

Remplissez toutes les parties obligatoires marquées d'un astérisque * du formulaire 62 et signez le formulaire. Les formulaires non signés ne seront pas traités.

⑤

**ÉTAPE 5**

effectuer le paiement par virement bancaire (demander les coordonnées bancaires en écrivant à l'adresse info@daphnelab.com)

⑥

**ÉTAPE 6**

Envoyez le formulaire 62 avec l'enveloppe contenant l'écouvillon et le reçu du paiement à Daphne Lab (de préférence par courrier avec suivi) à l'adresse suivante :

**Daphne Lab - c/o Eldavia
Via Milano, 2
81030 Lusciano (CE)
ITALIE**